

Ediție/Revizie:
02/01

Cod document:
FT-01-025

Data ultimei revizii:
18.09.2024

Cod produs:
B025-RO

❖ Avantaje

- ✓ Peste 99% ingrediente biodegradabile
- ✓ Eficiență demonstrată
- ✓ Nu spumează, nu necesită clătire, ștergere, nu decolorează
- ✓ Se aplică sub formă de ceață uscată prin tehnica nebulizării
- ✓ Neutralizează mirosurile neplăcute
- ✓ Nu conține: aldehide, fenoli, clor, conservanți
- ✓ Prezintă capacitate bună de curățare și degresare

❖ Utilizare

Dezinfectarea suprafețelor prin tehnica nebulizării.

❖ Instrucțiuni de utilizare

Produsul se utilizează ca atare sau se diluează în proporție de 20 ÷ 50% v/v pentru dezinfecția de nivel redus, iar după aplicare nu necesită clătire. Produsul se utilizează pe suprafețe curate.

Tehnici de aplicare:

- nebulizare.

Pentru dezinfectarea suprafețelor prin nebulizare produsul se utilizează ca atare, iar cantitatea utilizată este de 10ml/m³ cu timp de contact de 30 minute (în acord cu activitatea biocidă EN 17272).

Etape de lucru:

- se conectează echipamentul la o sursă de curent electric (220V),
- se conectează recipientul de produs la echipament,
- se setează cursorul echipamentului de nebulizare astfel încât echipamentul să poată nebuliza 10ml/1m³. Pentru o încăpere de 50m³ se poziționează cursorul în dreptul valorii de 170m³ (echipamentul este setat să introducă un debit de 3ml la 1m³, iar pentru a introduce cantitatea de 10ml/m³ se va seta un volum mai mare al spațiului).
- după pregătirea echipamentului și pornirea ciclului de nebulizare personalul părăsește încăperea. Utilizarea produsului se face respectând cerințele de protecție a personalului menționate în SDS produs (atenție la protecția pielii și căilor respiratorii!).
- după timpul de contact (30 minute) se vor aerisi/ ventila încăperile timp de 10-30 minute în funcție de posibilitățile tehnice de aerisire. Personalul lucrător va accesa încăperile doar după timpul de aerisire/ ventilare.

Produsul este ideal utilizării: în spitale, clinici, laboratoare, policlinici, cabinete medicale, ambulanțe, inclusiv zonele de birou ale acestora sau zonele de cantină, dar nu pe alimente/ contact direct cu acestea. Este ideal pentru utilizarea pe suprafețe intens accesate de oameni cu un risc mare de contaminare (spații de triaj/ așteptare, vestiare, camere pentru consultații, ambulanțe).

Produsul este compatibil cu suprafețe metalice neacoperite (zinc, bronz, argint, aur, inox medical/ alimentară/ 314L/ 316L), metalice acoperite (vopsea, galvanizate, email, rășini), plastice de diferite tipuri (PP, PE, HDPE, ș.a.), cauciuc, silicon, teflon, linoleum, lemn, compozite minerale (gresie, faianță, marmură, beton, ș.a.).

Tip produs biocid: grupa principală I, PT 2.

❖ Eficacitatea microbiologică

Eficacitate	Concentrație	Timp de contact
Bactericidă EN 13727	≥ 30%	2 minute
Bactericidă EN 13697	≥ 50%	3 minute
Fungicidă EN 13697	≥ 50%	3 minute
Fungicidă EN 13624	≥ 80%	3 minute
Sporicidă EN 13704	20%	15 minute
Micobactericidă / Tuberculocidă EN 14348	80%	60 minute
Levuricidă EN 13624	≥ 20%	5 minute
Micobactericidă / Tuberculocidă EN 14563	100%	40 minute
Bactericidă/ Levuricidă EN 16615	70%	3 minute
Bactericidă EN 13697 (MRSA)	80%	5 minute
Levuricidă EN 13697	≥ 20%	5 minute
Virucidă EN 14476	≥ 80%	5 minute
Virucidă EN 14476 (anvelopați)	≥ 30%	1 minute
Fungicidă EN 1650	≥ 20%	5 minute
Levuricidă EN 14562	80%	10 minute
Bactericidă EN 14561	80%	10 minute
Bactericidă EN 1276	≥ 20%	5 minute
Bactericidă/ Levuricidă/ Fungicidă/ Micobactericidă/ Tuberculocidă/ Virucidă? Sporicidă EN 17272	100%	30 minute
Virucidă EN 16777	100%	5 minute
Bactericidă EN 17387	50%	3 minute
Levuricidă/ Fungicidă EN 17387	100%	3 minute
Virucidă EN 17111	100%	8 minute

❖ Caracteristicile produsului

- Compoziție ingrediente active pentru 100g produs: 6% Peroxid de hidrogen, nr. CAS: 7722-84-1, CE: 231-765-0 și 0,35% Clorură de didecildimetil amoniu nr. CAS: 7173-51-5, CE: 230-525-2.
- Alte ingrediente: apă, agent pentru corecție pH și stabilizant.
- Descriere: lichid incolor, translucid/ ușor opalescent, cu miros specific
- pH = 2,3 ±0,5
- Solubil în apă

❖ Informații privind siguranța în utilizare



Se recomandă consultarea și respectarea informațiilor specificate în fișa cu date de securitate a produsului (FDS/ MSDS). Pentru a accesa MSDS produs: solicitați furnizorului, sau consultați pagina web: www.klintensiv.com

Nu utilizați produsul dacă a expirat sau în condiții diferite față de cele recomandate.

❖ Alte informații

Termen de valabilitate produs: 2 ani de la data fabricației, respectiv 6 luni de la deschiderea recipientului. Soluția preparată în diluții conforme cu cerințele din aviz, respectiv nivelul de eficacitate dorit, se utilizează în maxim 48 de ore de la preparare, respectând cerințele de preparare și depozitare.

Depozitare produs: în recipientul original, la temperaturi pozitive cuprinse între 5 - 30°C.

❖ Informații suplimentare, opinii de specialitate

Consultați pagina web: www.klintensiv.com

Pentru alte detalii privind produsul, modul de utilizare vă rugăm utilizați mail: office@klintensiv.com, telefon: 021/44.81.498.

Informațiile referitoare la acest produs sunt actualizate în mod controlat, atunci când este cazul, de aceea trebuie să vă asigurați că utilizați o variantă actualizată.