

ISORAPID® Spray

MARCAJ CE 2460

Aria de aplicare: Dezinfecția rapidă a suprafețelor în unități sanitare (spitale, clinici, cabinete medicale), cabinete medicină dentară: (suprafețe mici ca de ex.: mese de laborator, scaune de tratament, suprafețele ale unitului, piese de mână și contra unghi, mânere ale lămpilor de examinare, suprafețe ale dispozitivelor medicale neinvazive (suprafețele instrumentarului din oțel, aluminiu, silicon și cauciuc, etc).

MOD DE UTILIZARE UNITĂȚI SANITARE

Se aplică prin pulverizare sau prin ștergere.

Deșurubați capacul recipientului și aplicați pompa pulverizatoare/capacul cu dop picurător Umeziți complet suprafața sau obiectul ce urmează a fi dezinfectat și lăsați substanța să acționeze (urmăriți timpii de expunere).

Dacă este necesar, ștergeți suprafața sau obiectele cu o lavetă de unică folosință.

A se utiliza numai pe materiale compatibile cu alcoolul. Efectuați un test înainte de a utiliza pe materiale sensibile prin aplicarea pe o zona mai greu de remarcat și de mici dimensiuni.

Bactericid	60 secunde
Bacterii rezistente la antibiotice	60 secunde
Levuricid	60 secunde
Levuri rezistente la antibiotice	60 secunde
Virusuri cu invelis	15 secunde
BVDV	15 secunde
Coronavirus	15 secunde
Virus hepatita B	15 secunde
Virus hepatita C	15 secunde
Virus Herpes simplex	15 secunde
HIV	15 secunde
Virus gripal A	15 secunde
Virus Vaccinia	15 secunde
Virusuri fara invelis	60 secunde
Adenovirus	60 secunde
Norovirus	30 secunde

In conformitate cu standardele SR EN, EN 13624, EN 13727, EN 14348, EN 14476, EN 14561, EN 14562, EN 14563, EN 16615 și normele RKI/DVV.

MOD DE UTILIZARE ÎN ALTE UNITĂȚI DECÂT CELE SANITARE

Aria de aplicare: Dezinfecția rapidă prin pulverizare si prin stergere în colectivități și saloane de înfrumusețare, sali de sport și fitness, hoteluri și restaurante, unități militare, penitenciare, cabinete coafură, frizerie, industria farmaceutică, mijloace transport (ambulante, transport persoane, etc.).

Se aplică prin pulverizare si prin ștergere.

Deșurubați capacul recipientului și aplicați pompa pulverizatoare/capacul cu dop picurător Umeziți complet suprafața sau obiectul ce urmează a fi dezinfectat și lăsați substanța să acționeze (urmăriți timpii de expunere).

Dacă este necesar, ștergeți suprafața sau obiectele cu o lavetă de unică folosință.

A se utiliza numai pe materiale compatibile cu alcoolul. Efectuați un test înainte de a utiliza pe materiale sensibile prin aplicarea pe o zona mai greu de remarcat și de mici dimensiuni.

Bactericid	60 secunde
Bacterii rezistente la antibiotice	60 secunde

Tuberculocid	60 secunde
Micobactericid	60 secunde
Levuricid	60 secunde
Levuri rezistente la antibiotice	60 secunde
Virusuri cu invelis	15 secunde
BVDV	15 secunde
Coronavirus	15 secunde
Virus hepatita B	15 secunde
Virus hepatita C	15 secunde
Virus Herpes simplex	15 secunde
HIV	15 secunde
Virus gripal A	15 secunde
Virus Vaccinia	15 secunde
Virusuri fara invelis	60 secunde
Adenovirus	60 secunde
Norovirus	30 secunde
Poliovirus	60 secunde

In conformitate cu standardele SR EN, EN 13624, EN 13727, EN 14348, EN 14476, EN 16615.

Se așteaptă până la uscarea completă a produsului pulverizat, dacă este necesar. Cantitatea de 16-20 ml/mp este suficientă pentru a umezii suprafețe netede la o temperatură ambientă de 20-23 C.

Cantitatea redusă de alcool de sub 50% asigură o înaltă compatibilitate cu materialele și un risc redus de apariție a alergiilor.

Compatibil cu majoritatea materialelor: Polimer acetal, Sticla acrilica, Acrilonitril butadien stiren, Aluminu, Piele artificiala, Clorura de polivinil clorurat, Poliamida, Tereftalat de poliubutelina, Policarbonat, Polietirimida, Polietilena, Tereftalat de Polietilen, Oxizi de polifenilen, Polifenilsulfona, Polipropilena, Poliestiren, Polisulfona, Clorura de polivinil, Florura de policarbonat de sodiu, Rodiu, Silicon, Elastomer termoplastice, Poliuretan termoplastice, Polietilena cu greutate moleculară ultra-înaltă.

Folosiți mănuși de protecție. Nu clătiți.

♦ **Biodegradabil. Degajă un miros plăcut. Nu lasă urme**

PERICOL H226 Lichid și vapori inflamabili. H318 Provoacă leziuni oculare grave. H336 Poate provoca somnolență sau amețeli. P210 Tineti departe de căldură, suprafețe fierbinți, scântei, flăcări deschise și alte surse de aprindere. Fumatul interzis. P233 Păstrați recipientul bine închis. P261 Evitați să respirați fumul/ceapa/vaporii/sprayul. P280 Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/protecție pentru ochi/protecție pentru față. P305 + P351 + P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiți cu atenție cu apă timp de câteva minute. Scoateți lentilele de contact, dacă sunt prezente și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți. P501 Eliminați conținutul/recipientul respectant reglementările naționale și locale în vigoare. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați Fișa cu date de securitate disponibilă pe site-ul nostru.

Eliminați acest produs cu respectarea normelor naționale și regionale în vigoare, respectiv legea OUG 92/2021 privind regimul deșeurilor. Cod deșeurilor EWC nr. 070699 (Grup: deșeurilor din categoria MFSU a grăsimilor, produselor grase, săpunurilor, detergenților, dezinfectanților și cosmeticilor). Cantități mici din acest produs (până la 500 ml/zi) pot fi eliminate prin sistemul centralizat de canalizare. Recipientele goale pot fi încadrate în categoria gunoierului menajer sau reciclate după curățarea cu apă. Recipientele se vor manipula în aceleași condiții impuse pentru manipularea produsului însuși. Eliminarea ambalajului contaminat se va face conform Legii 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje. Utilizatorul este unic responsabil pentru luarea la cunoștință și respectarea acestor reglementări.

**SE INTERZICE AMESTECUL SOLUȚIEI CU ALTE PRODUSE ȘI REUTILIZAREA AMBALAJULUI
IN CAZUL UTILIZĂRII DE CĂTRE PUBLICUL LARG!**