

Versiunea:
08

Cod document:
FT-01-066

Data ultimei revizii:
07.02.2025

Cod produs:
B066-RO

❖ Avantaje

- ✓ Peste 90% ingrediente biodegradabile
- ✓ Nu conține coloranți, nu pătează
- ✓ Eficiență demonstrată în condiții de curățenie / murdărie
- ✓ Dozaj ușor, sub formă de tabletă/ comprimat

❖ Utilizare

Dezinfectarea suprafețelor de diverse tipuri, respectiv pavimentelor din zone specifice unităților medicale, dar și instrumentar / dispozitive medicale precum (olițe, ploști urinare, tăvițe renale, ș.a.), obiecte de inventar și grupuri sanitare. Acesta mai poate fi utilizat atât colectivități cât și în domeniul casnic (inclusiv pentru dezinfecția apei din piscine). Produsul poate fi utilizat pentru dezinfectarea suprafețelor în industria farmaceutică.

Dezinfectarea materialelor textile prin imersie.

❖ Instrucțiuni de utilizare

Produsul se dizolvă ușor în apă, deoarece este sub formă de comprimate efervescente. Pentru a obține soluția gata de lucru se dizolvă 2 tablete în 1,5L de apă. Produsul se aplică pe suprafețe curate, iar acesta prezintă acțiune rapidă (timp de contact 5 minute).

Tehnici de aplicare:

- se folosește un pulverizator manual,
- mop / lavetă curată din material sintetic (preferabil poliester/ polietilenă)
- imersie în vas cu lichid.

Pentru dezinfecția suprafețelor se folosește o cantitate suficientă pentru acoperirea totală a acestora (4-10ml acoperă 1m²), prin tehnicile de aplicare direct pe suprafețe. După aplicarea produsului se recomandă ventilarea/ aerisirea încăperilor.

Pentru dezinfectarea instrumentarului medical se utilizează o soluție de concentrație 0,2‰m/v (2 tablete la 1,5L apă). Se recomandă îndepărtarea resturilor organice (sânge, puroi, țesut, ș.a.), cu un agent de curățare tip detergent non-enzimatic/ enzimatic. Produsul poate fi utilizat inclusiv în cuvele de dezinfectare a instrumentarului cu / fără ultrasunete. Instrumentarul trebuie plasat în cuva de dezinfectare astfel încât să fie acoperit și umplut total de lichidul dezinfectant. Timpul de contact este de 30 minute. După dezinfectare se recomandă clătirea instrumentarului cu apă sterilă. Soluția din cuvă poate fi reutilizată pentru 7 seturi de instrumentar, iar după 4 ore de la preparare este înlocuită cu altă soluție nou preparată.

Nu se recomandă prepararea unor cantități mari pentru a fi depozitate, soluția gata de lucru se prepară doar la nevoie.

Dezinfectarea textilelor se realizează prin imersia acestora în soluție dezinfectantă de concentrație 0,2‰m/v, iar timpul de contact este de 30 minute.

Produsul este ideal utilizării: în spațiile sanitare (zone de laborator, vestiare, grupuri sanitare, căi de acces, dar și sticlărie de laborator, suprafețe dure de lucru, pavimente). Mai poate fi folosit pentru dezinfectarea suprafețelor din spațiile publice și private.

Datorită efectului puternic antifungic produsul poate fi utilizat pentru curățarea și distrugerea zonele cu mușegai.

Prin acțiunea oxidantă a produsului față de depunerile organice (urme de alimente, proteine, grăsimi, zaharuri și altele), produsul prezintă și acțiune de curățare/ degresare a suprafețelor.

A se evita aplicarea produsului direct pe alimente/ produse comestibile/ suprafețe în contact direct cu alimentele. Pentru suprafețe ce sunt în contact direct cu alimentele se recomandă clătire cu apă potabilă după timpul de acțiune al produsului (sub jet sau ștergere cu lavete curate de unică întrebuințare).

Materiale compatibile: plastic, sticlă, ceramică, oțel inoxidabil, cupru, zinc, crom, aluminiu, suprafețe acoperite (cromate, galvanizate, vopsite), cauciuc, tarkett/ linoleum, teflon, gresie/ faianță/ marmură.

În timpul utilizării produsului se recomandă protejarea mâinilor și a feței, atenție în contact cu materiilor organice și apa caldă degajă vapori iritanți specifici produselor pe bază de clor.

Tip produs biocid: grupa principală I, TP 2.

❖ Eficacitatea microbiologică

Eficacitate	Concentrație	Timp de contact
Bactericidă EN 1276	1 tabletă/ 3L apă	5 minute
Bactericidă EN 13727	1 tabletă/ 3L apă	30 minute
	1 tabletă/ 1,5L apă	5 minute
Bactericidă EN 13697	1 tabletă/ 1L apă	5 minute
	1 tabletă/ 10L apă	60 minute
Bactericidă EN 13697 (MRSA)	1 tabletă/ 1,5L apă	5 minute
Bactericidă EN 13623	8 tablete/ 1000L apă	60 minute
Fungicidă/ Levuricidă EN 13697	2 tablete/ 1,5L apă	5 minute
Levuricidă EN 13697	1 tabletă / 15L apă	15 minute
Fungicidă EN 13697	1 tabletă / 7,508L apă	60 minute
Fungicidă/ Levuricidă EN 13624	2 tablete / 1,5L apă	5 minute
Fungicidă EN 13624	1 tabletă / 5L apă	60 minute
	1 tabletă / 1,247L apă	30 minute
Levuricidă EN 13624	1 tabletă / 12,515L apă	15 minute
Fungicidă/ Levuricidă EN 1650	1 tabletă/ 1L apă	5 minute
Fungicidă EN 1650	1 tabletă/ 5L apă	15 minute
Levuricidă EN 1650	1 tabletă/ 10L apă	15 minute
Sporicidă EN 13704	2 tablete/ 1,5L apă	5 minute
Virucidă EN 14476	2 tablete/ 1,5L apă	5 minute
	1 tabletă/ 5L apă	30 minute
Micobactericid EN 14348	2 tablete/ 1,5L apă	5 minute
	1 tabletă/ 2L apă	30 minute
Sporicidă EN 13704 (EN 17126, <i>C. difficile</i>)	2 tablete/ 1,5L apă	5 minute
	7 tablete/ 5L apă	60 minute
Bactericidă EN 14561	1 tabletă / 3L apă	30 minute

Eficacitate	Concentrație	Timp de contact
Levuricidă/ Fungicidă EN 14562	1 tabletă / 3L apă	30minute
Tuberculocidă/ Micobactericid EN 14563	2 tablete/ 1,5L apă	30 minute
Tuberculocidă/ Micobactericid EN 14348	2 tablete/ 1L apă	30 minute
Fungicidă/ Levuricidă EN 16615	1 tabletă/ 3L apă	30 minute
Virucidă EN 16777	2 tablete/ 1,5L apă	5 minute
Virucidă EN 17111	2 tablete/ 1,5L apă	5 minute
Sporicidă EN 17126 <i>C. difficile</i>	2 tablete/ 1,5L apă	5 minute
Sporicidă EN 17126	3 tablete/ 2L apă	60 minute
Bactericidă EN 17387	1 tabletă/ 2L apă	60 minute
Fungicidă EN 17387	1 tabletă/ 3L apă	60 minute

❖ Caracteristicile produsului

- Compoziție ingrediente active pentru 1 tabletă produs: 1,5g Clor activ sub formă de Dicloroizocianurat de sodiu dihidrat CAS: 51580-86-0; CE: 220-767-7.
- Alte ingrediente: amestec agenți pentru efervescență în contact cu apa (tip acid-bază solizi).
- Descriere: tabletă albă, cu miros specific de clor
- Solubil în apă

❖ Informații privind siguranța în utilizare

Se recomandă consultarea și respectarea informațiilor specificate în fișa cu date de securitate a produsului (FDS/ MSDS). Pentru a accesa MSDS produs: solicitați furnizorului, sau consultați pagina web: www.klintensiv.ro

Nu utilizați produsul dacă a expirat sau în condiții diferite față de cele recomandate.

❖ Alte informații

Termen de valabilitate produs: 5 ani de la data fabricației, respectiv 6 luni de la deschidere.

Depozitare produs: în recipientul original, la temperaturi pozitive cuprinse între 5 - 40°C.

Produs testat în acord cu cerințele ISO 14885:2022.

Ambalajul conține cel puțin 30% material plastic provenit din reciclare, iar după utilizare poate fi spălat cu apă și reciclat ca material plastic.

❖ Informații suplimentare, opinii de specialitate

Consultați pagina web: www.klintensiv.ro

Pentru alte detalii privind produsul, modul de utilizare vă rugăm utilizați mail: office@klintensiv.ro, telefon: 021/44.81.498.

Informațiile referitoare la acest produs sunt actualizate în mod controlat, atunci când este cazul, de aceea trebuie să vă asigurați că utilizați o variantă actualizată.